


值班室分机

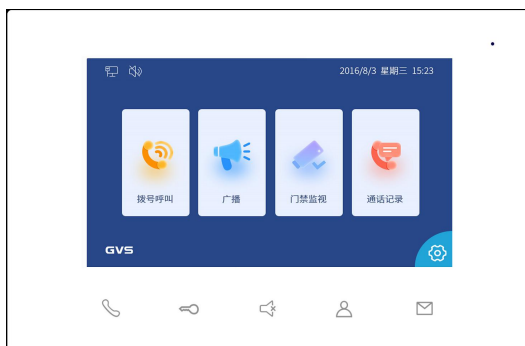

智系列数字系统_V1.0

H-IS07-W

注意事项

- 1、请远离强磁场、高温、潮湿等环境；



- 2、不要将设备摔落在地上或使之受到强力冲击；



- 3、不要使用湿布或具挥发性的试剂擦拭设备；



- 4、请勿自行拆卸本设备。

目录

第一章 功能概述.....	4
第二章 产品简介.....	5
2.1 产品外观.....	5
2.2 产品尺寸图.....	6
2.3 规格参数.....	6
2.4 接口说明.....	7
第三章 基本功能.....	8
第四章 安装说明.....	9
4.1 安装高度.....	9
4.2 安装说明.....	10



第一章 功能概述

本产品是智系列的值班室分机，安装于医院或养老院值班室内，采用标准六类线连接，基于 TCP/IP 传输协议，支持同患者端床头屏呼叫、呼叫护士站管理机、监视病区门禁机等功能。

- 采用 7 寸电容触摸屏设计
- 可支持标准 48V PoE 供电
- 支持病区广播
- 支持实时监控，可监视病区门禁机
- 信息接收和发送，可接收管理中心发的信息
- 具有标准 7 防区安防报警功能（使用该功能需定制软件）

第二章 产品简介

2.1 产品外观

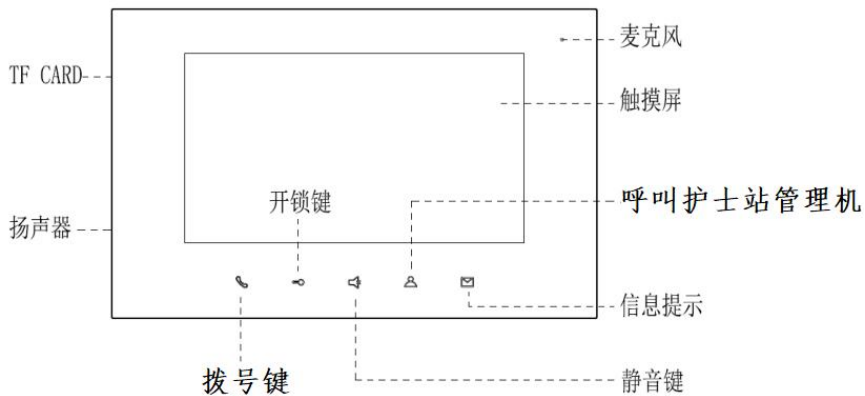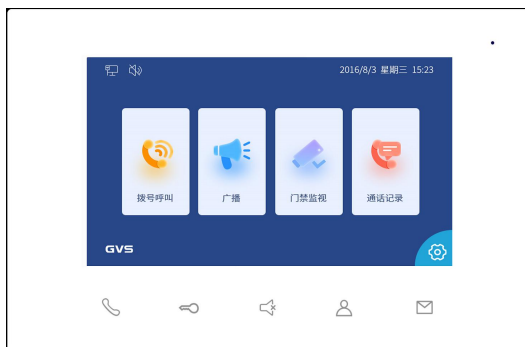

2.2 产品尺寸图



2.3 规格参数

工作电压：DC 24V

本机静态电流：≤ 80 mA

本机工作电流：≤ 200 mA


显示屏：7 寸

分辨率：800 × 480

外形尺寸(L × W × D)：220× 140× 17.5mm

环境温度：-10℃ ~ +55℃

2.4 接口说明

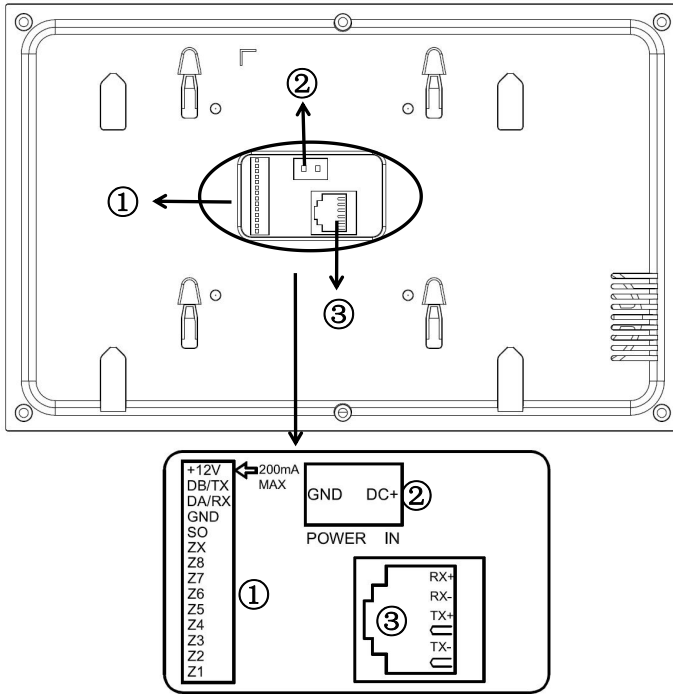

编号①:

+12V、GND：防区探测器供电接口（供电电流 $\leq 200\text{mA}$ ）。

DA/RX、DB/TX：485 接口。

Z8：默认门铃功能。

ZX：防区扩展接口。

Z7 至 Z1：标准防区接口，支持接入常开/常闭安防模块。

编号②:

电源输入接口 DC 12 V ~ 24 V。


编号③:

网络接口


第三章 基本功能




拨号呼叫

点击  图标，进入对讲界面，可呼叫护士站管理机、病床分机、病区门禁机。


广播

点击  图标，可编辑发布病区广播。


门禁监视

点击  图标，可对病区门禁进行视频监控，同时可进行远程开锁操作。

通话记录


点击  图标，可查看所有的通话记录。

设置

点击  图标，可在后台设置时间、密码、亮度及托管管理机等。





第四章 安装说明

4.1 安装高度

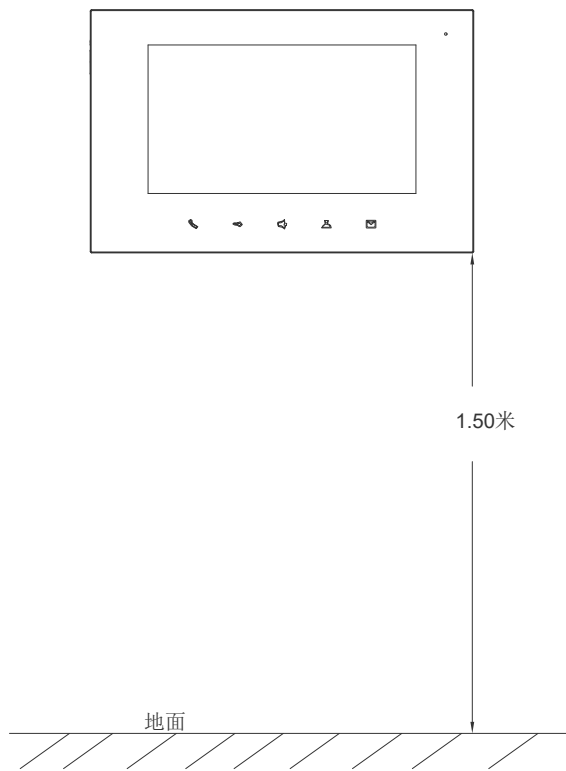

建议安装高度：1.5 米

4.2 安装说明

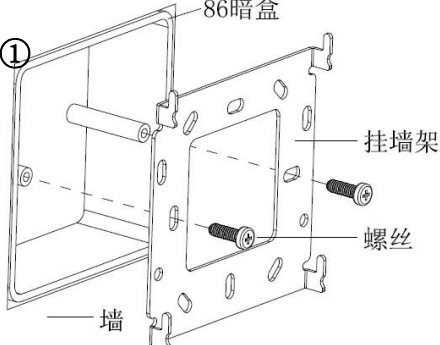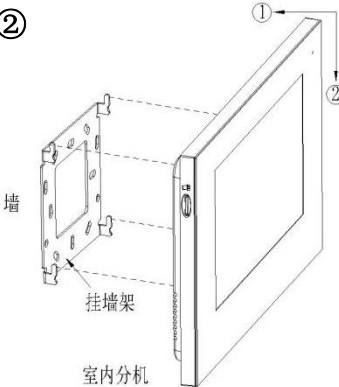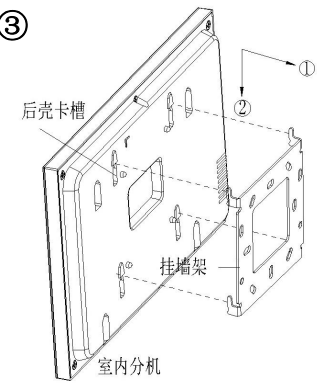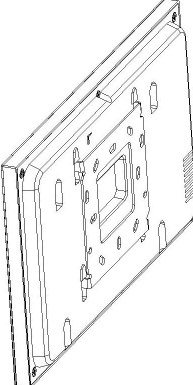 <p>86暗盒</p> <p>挂墙架</p> <p>螺丝</p> <p>墙</p> <p>①</p>	<p>第一步：将挂墙架螺丝孔对准墙上 86 暗盒孔位，拧紧螺丝固定好挂墙架。</p>
 <p>墙</p> <p>挂墙架</p> <p>室内分机</p> <p>②</p>	<p>第二步：</p> <p>将接线端连接到室内分机，将分机后的卡槽对准挂墙架的卡扣（如图②）。在挂墙架四个卡扣对准后壳四个卡槽后。再稍微用力将分机平直往下压（如图③）。听到咔哒的声音后，分机安装成功（如图④）。</p>
 <p>后壳卡槽</p> <p>挂墙架</p> <p>室内分机</p> <p>③</p> <p>对准挂墙架</p>	 <p>④</p> <p>卡入挂墙架后的状态</p>